

Los resultados obtenidos con FibroScan® le ayudarán a su médico a controlar la salud de su hígado.

Es importante que le diga al médico o la enfermera que le atiende si está embarazada o tiene algún dispositivo electrónico implantado activo, como marca-pasos, desfibrilador, bombas (insulina, morfina...). **No debe utilizar FibroScan si está embarazada o tiene un dispositivo implantado. Lo que puede esperar de un dispositivo para electrónico FibroScan®.**

Para obtener más información, consulte con su médico o su proveedor de atención de salud.

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
Mi examen FibroScan®

CITA MÉDICA

FECHA __/__/____

HORA __/__/____

SELLO DEL MÉDICO/HOSPITAL _____



Que esperar de un examen FibroScan®

Un examen rápido, indoloro y completamente no invasivo para su hígado.

FibroScan®

www.echosens.us
www.myliverexam.us



¿Qué es FibroScan®?

El examen con FibroScan®, también llamado elastografía de transición, es un método no invasivo para medir la rigidez de su hígado. FibroScan® funciona emitiendo un pequeño pulso de energía, que se puede sentir como una leve vibración en la piel. FibroScan® calcula la velocidad de esta energía para entregarle a su proveedor de atención de salud una medición inmediata de la rigidez de su hígado. La medición de la rigidez puede tener gran importancia para comprender la salud general de su hígado.



Las sondas FibroScan® se adaptan a la mayoría de los tipos de cuerpos de los pacientes y a todas las edades, desde pacientes pediátricos a adultos.

¿Es doloroso? No.

El examen FibroScan® es indoloro, rápido y fácil. Durante la medición, se siente una leve vibración en la piel en la punta de la sonda.

¿Cómo se realiza el examen Fibroscan®?

- Usted debe recostarse de espaldas, con el brazo derecho levantado detrás de la cabeza. Su proveedor de atención de salud le aplicará un gel a base de agua en la piel y luego, colocará la sonda en el lado derecho de su caja torácica.
- Su médico o enfermera realizará 10 mediciones rápidas durante el curso del examen FibroScan®. Estas mediciones se utilizarán para establecer una medición de rigidez general.



¿Cómo debería prepararme para mi examen FibroScan®?

- Es importante que el examen FibroScan® lo haga con el estómago vacío, por lo tanto, no coma nada al menos durante 3 horas antes del examen.
- Use ropa cómoda para que le permita a su proveedor de atención de salud dejar expuesto el lado derecho de su caja torácica.

El examen FibroScan® está cubierto por la mayoría de los planes de seguros.